

**[수입업자의 상호와 주소]**

(주)쿠엔쿠스 / 서울시 광진구 아차산로78길 44, 508호(광장동, 크레스코빌딩) / Tel. 02-452-1790

**[제조원]** ERKA. Kallmeyer Medizintechnik GmbH & Co. KG(독일)

**[품목명]** 의약품압력주입기

**[모델명]** SWITCH 2.0 HPC 500ml, SWITCH 2.0 HPC 1,000ml

**[허가번호]** 수신 22-991 호

**[포장단위]** 1박스/개별포장

**[사용목적]** 컵를 정맥주사용 수액제 용기 주위에 감아 공기 압력을 줌으로써 주사액의 주입을 도와주는 기기

**[보관 또는 저장방법]** 실온보관

**[사용방법]**

1. 사용 전 준비사항

1) 제품을 손에 들고 밸브가 닫혀 있는지 확인한다.

2. 사용방법

1) 주입백을 압력주머니 안에 넣는다.

2) 주입백을 커버 상단의 후크에 건다.

3) Pump Ball을 수동으로 작동하여 Bladder를 팽창시켜 의료진이 원하는 압력을 설정한다.

4) 제품 사용 후 밸브를 열어 제품이 완전히 수축되도록 한다.

3. 사용 후 관리방법

1) 제품 사용 후 스프레이 또는 부드러운 천으로 소독제를 바르고 닦아서 제품을 관리한다.

**[사용 시 주의사항]**

1. 본 제품은 교육 받은 사람만 사용해야 한다.

2. 사용하기 전에 공기가 새는 곳이 없는지 확인한다.

3. 사용하기 전에 제품에 공기가 남아있는지 확인한다.

4. 주입할 제품의 주의사항을 확인해야 한다.

5. 압력을 가할 수 있는 주입백을 사용해야 한다.(병은 안됨)

6. 게이지가 진동이나 충격을 받지 않도록 해야 한다.

7. 고무로 된 부분은 직사광선을 피하고, 손상되지 않도록 주의한다.

8. 제품을 먼지와 습기로부터 보호한다.

9. Bladder는 Pump Ball을 통해서만 팽창시켜야 한다. 이동식 가압장치와 같이 사용하면 안된다.

**[의료기기]**

**[첨부문서 작성일자]** 2022. 06. 22. (Rev. 01)