

[수입업자의 상호와 주소]

(주)쿠엔쿠스 / 서울시 광진구 아차산로78길 44, 507,508호(광장동, 크레스코빌딩) / Tel. 02-452-1790

[제조원] SHENZHEN MED-LINK ELECTRONICS TECH CO, LTD (중국)

[품목명] 혈압검사용커프

[모델명]

Y000T1	Y000L1	Y000A1	Y000C1	Y000I1	Y000N1	
Y000T2	Y000L2	Y000A3	Y000C2	Y000I2	Y000N2	Y000S1

[허가번호] 서울 수신 12-823 호

[포장단위] 1개/개별포장

[사용목적] 환자의 혈압을 검사하는 기기에 연결하여 측정하는 커프로서, 커프 내의 공기주머니를 가압하거나 감압하는 기구

[보관 또는 저장방법] 실온보관

[사용방법]

1. 커프의 고무호스 플러그를 본체 소켓에 연결한다.
2. 왼손은 위로하여 고무호스가 손바닥 위에 오도록 착용한다.
3. 커프가 팔꿈치로부터 2~3cm 위에 오도록 하여 착용한다.
4. 사용 후에는 벨크로를 다시 풀러 적당한 장소에 보관한다.

[사용 시 주의사항]

1. 사용할 때 주의사항
 - 1) 측정 전 환자의 상태를 안정시키고 올바른 상태에서 측정이 되도록 한다.
 - 2) 커프 등의 연결 상태가 양호한지 확인한다.
 - 3) 기기, 측정부위, 심장과의 높이가 동일한지 확인한다.
2. 사용 후 보관 관리 방법
 - 1) 사용 후 기압, 온도, 습도, 바람 등의 악영향을 받는 곳에 보관하지 않는다.
 - 2) 사용 후 이물질이 묻었을 경우에는 병원 위생 및 세척 방법에 따라 청결히 한 후 보관한다.

[의료기기]

[첨부문서 작성일자] 2013. 05. 27 (Rev. 01)